

酸化鉄粉末成型板の中央に小さな穴をあけ、そこからハリ先を出してテープで固定した鍼用器具です。貼付時および貼付中に、ハリ先による不快感もなく、簡単な使用で鍼治療ができます。

No80 スポールバン 20本入り(滅菌済み)



使用方法

- ・皮膚の汚れや汗をふきとり清潔にしてご使用ください。(できれば、市販の消毒薬で消毒してください。)
- ・コリや痛みのあるところを指で押さえ、特に痛みや不快感のある箇所を中心に貼ってください。

使用上の注意

- ・傷・湿疹等のある場所を避けてください。
- ・アレルギー体質の方は使用を避けてください。
- ・皮膚面に直角に正しく貼ってください。
- ・入浴時は、貼付箇所をタオル等で強くこすらないでください。
- ・2-3日毎に、わずかに場所をずらして、新しいものと貼りかえてください。
- ・貼付箇所にカユミやカブレが生じた時は、早めに使用を中止してください。
- ・1回限りの使用とし、再使用はしないでください。

セット内容

20本入り

保管及び取扱い上の注意

幼児の手の届かない所に保管してください。