

装着部位のこり及び血行の改善 No99 エレキバン 30粒

管理医療機器



医療機器承認番号22100BZX00205000

【特長】

- 1.) コリをほぐし、血行をよくします。
- 2.) 表面磁束密度80±5mT。
- 3.) コリのある部位に手軽に貼れ、ニオイもなく目立ちません。
- 4.) 湯水に濡れてもサビたり剥がれたりすることがなく、貼ったまま入浴できます。

【禁忌・禁止】

心臓ペースメーカー等植込み型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの 医用電子機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。

- 使用目的、効能又は効果一般家庭での磁気治療に使用する。
装着部位のこり及び血行の改善。

- 品目仕様等 ■ 恵麗喜絆:最大磁束密度 80 mT(ミリテスラ)

- 操作方法又は使用方法 肩、首すじ、腰などのコリのある部位に貼ってください。

- (1)本品をはく離紙からとりはずす。
- (2)コリのポイントに貼る。
(指で押して「痛いところ」や「気持ちの良いところ」に貼る。)

■使用上の注意 ■

- 1.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。
 - (1)悪性腫瘍のある方
 - (2)心臓に障害のある方
 - (3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
 - (4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - (5)皮膚に感染症または創傷のある方
 - (6)安静を必要とする方
 - (7)体温38℃以上(有熱期)の方
例1.急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期
例2.衰弱しているとき
 - (8)ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性(とう)疼痛疾患の方
- 2.他の治療器と同時に使用しないでください。
- 3.使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。
- 4.使用前には次のことにご注意ください。
 - (1)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
 - (2)しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
- 5.使用中には次のことにご注意ください。
 - (1)身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
 - (2)装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは使用を直ちに中止してください。
- 6.使用后、保管には次のことにご注意ください
機器を破棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。
- 7.機器の取り扱いには次のことにご注意ください。
機器は改造しないでください。

- 貯蔵・保管方法及び使用 1.小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。
2.磁石が引き合うように重ねて保管してください。
それ以外の重ね方をすると、磁石が反発してズレたり、はがれる原因になります。

- 保守・点検に係る事項 使用に際し、異物の付着等がないか確認の上ご使用下さい。
常に使用前の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、
下記記載の共立薬品工業株式会社お客様相談室までご連絡ください。

【製造販売元】共立薬品工業株式会社

奈良県高志郡高取町清水谷1085番地

〈お客様相談室〉0744-52-4741

〈受付時間〉9:00～17:00(土・日・祝を除く)