

貼るだけで自然治癒力を高める

No87 キズパワーパッド ふつうサイズ 10枚



商品説明

「バンドエイド キズパワーパッド ふつうサイズ10枚」は、傷口を治すのに最適な環境(湿潤環境)を維持するとともに乾燥による神経への刺激を抑えます。全体が柔らかくしなやかな、目立たない肌色半透明のハイドロコロイド素材でできています。高い粘着力で身体の動きにぴったりフィットしますので、つけていても気になりません。すぐれた防水性・防菌性で、お風呂やシャワーも平気です。

【効能・効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

【用法・用量】 本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、用法・用量を確認して正しくご使用ください。

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2.小児に使用する場合は、保護者の監督のもとに使用してください。また、2歳以下の乳幼児には使用しないでください。
- 3.本品は外用ですので、内服しないでください。

【サイズ】 ふつうサイズ(レギュラー)60mmX20mm 10枚入

【使用上の注意】●してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたり、副作用が起こりやすくなる。)

1.次の部位には使用せず、医師の診察を受けること。(使用した場合、傷の悪化、発熱、治癒の遅れにつながる場合がある)

(1)感染がみられる傷。感染がみられる傷とは、傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常が認められる傷のこと。

(2)にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状。

(3)かさぶたがすでにできている傷。(はがす時に製品がかさぶたにくっつくなどして、再び傷つける恐れがある。)

(4)深いさし傷、筋肉・骨・腱が見えるような深い傷。

(5)動物に咬まれた傷。

(6)ガラス・木片・砂・衣服の繊維などの異物が入り込んだ傷。

(7)目の周囲、粘膜。

2.本品を切って使用しないこと。一度開封したものを使用しないこと。一度使用したものを再使用しないこと。

3.一枚でおおいきれない大きさの傷には使用しないこと。傷の大きさより大きいサイズの製品を使用すること。

4.傷に塗布する軟膏・クリーム及びヨードチンキ等の殺菌・消毒剤を、本品と併用しないこと。使用した場合は、水道水又は滅菌生理食塩水などで残さないようによく洗い流すこと。

5.出血させたり、再生した皮膚を取り除かないように、注意して静かにはがすこと。

6.2歳以下の乳幼児には使用しないこと。

●相談すること 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

糖尿病や血行障害の治療を受けている人。

2.次の場合は、使用を直ちに中止し、添付文書を持って医師の診察を受けること。

(1)本品の使用により、傷の悪化、化膿、感染(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常が認められる場合)、傷の治りが悪い等の症状があらわれた場合。

(2)本品の使用により、傷口の周りに、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合。

(3)貼付中に感染を示す症状(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常)が認められた場合。

(4)数日間使用しても症状がよくなる場合。

(5)はがす時に膿のようなものが認められた場合。(膿は、淡黄色でねばねばしており、臭いがする。又、膿の場合、傷口の周りに赤い腫れをとまとう。ただし、透明またはグリーンのゲル状で、臭いが無い場合は、製品の残留物/傷口からで

口の周りに付く汗や皮脂を拭き取る。ただし、最初入は清潔なタオルで、拭いた後の口は、表面の分泌物が取り除かれてくる体液(滲出液)を本品が吸収したもの)なので、水道水又は滅菌生理食塩水などで洗い流すこと。)

発売元・製造元

ジョンソン・エンド・ジョンソン

広告文責:株式会社グローバルネットエルズ

連絡先電話番号:06-4792-7007

る。)