

無色殺菌剤配合救急絆創膏

No84 新カットバンA 3サイズ(大・中・小) 80枚



製品の特徴
使用上の注意

本品は半透明ビニール絆創膏の中央に殺菌剤配合パッドを貼付し、ライナーで覆ったもので一般外傷の処置に大変便利です。
■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ

効能・効果
効能関連注意
用法・用量
用法関連注意

切り傷、すり傷、かき傷、靴ずれの創傷面の殺菌消毒および保護

ライナーをはぎとりパッドを患部にはってください。

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。

(3)粘着面を患部にはらないでください。

(4)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。

成分分量

パッド1000g中

成分	分量	内訳
ベンザルコニウム塩化物	0.90g	

(1枚L25×72mm2, M19×72mm2, S12×52mm2, パッチ38×38mm2)

添加物

パッド部分:ポリビニルアルコール(完全けん化物)

テープ部分:ロジン、生ゴム、エステルガム、ポリブテン、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

消費者相談窓口

会社名: 祐徳薬品工業株式会社
住所: 佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
問い合わせ先: お客様相談窓口
電話: 0954-63-1320

製造販売会社

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)
祐徳薬品工業(株) 添付文書情報: J0601006162_03_A.pdf
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1